

ANTIGENNÍ TESTY

Sedmero zásad pro správné testování

Test: COVID-19 Antigen Detection Kit (Colloidal Gold) Model A
Výrobce: Zhuhai Lituo Biotechnology Co., Ltd

Pro správný odběr vzorku a vyhodnocení testu dodržujte tyto zásady:

- 1 • provedte stěr vzorku z těchto variant:
 - **z dutiny ústní** - pečlivým **několikanásobným setřením z obou krčních mandlí**, a to tak, aby se odběrový tampon na tyčince nedotýkal jazyka,
 - **z přední části nosu** - jemným zatlačením (dokud neucítíte odpor) vložte odběrový tampon do nosní dutiny a jemným, **několikanásobným, otočením a přitlačením otřete tampon o vnitřní stěnu nosních dutiny**. To je doporučeno provést v obou nosních dutinách.
- 2 • otevřete uzávěr plastové ampulky, vyjměte tampon z nosu nebo ústní dutiny a rychle ponořte do extrakčního roztoku v plastové ampulce. **Po dobu 30 sekund tyčinku v ampulce promíchejte;**
- 3 • při vytahování tyčinky **dvěma prsty zmačkněte plastové stěny ampulky, tak aby vytahováním došlo k dokonalému vymačkání obsahu** tampónku do ampulky;
- 4 • ampulku uzavřete uzávěrem a **protřepejte**, následně odšroubujte vrchní špičku uzávěru a nakapejte 2 – 3 kapky na test;
- 5 • do 5 ti minut od nakapání se začne objevovat první ryska (označena jako C). **Pokud se neobjeví ani po 10 min. od nakapání je test nekorektní** a je nutné ho opakovat s novou sadou;
- 6 • v případě pozitivního testu se do 15 min začne objevovat druhá ryska (označena jako T), v případě negativního testu se ryska T neobjeví (a to ani velmi slabým vykreslením);
- 7 • **test je vhodné pečlivě překontrolovat po 25 min. od provedení. I méně výrazná slabá ryska T znamená pozitivitu testu.**

